

TECHNISCHE INFORMATION

**KLEEN
PURGATIS**

FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL

BUDESIN U VAH-gelistet (DGHM)



Art.-Nr. 90.142.512 10-l-Kanister

- Flächendesinfektionsmittel für alle abwaschbaren Flächen und Gegenstände wie im Krankenhaus, in der allg. Praxis, Schwimmbädern, Solarien und Saunen
- besonders wirtschaftlich
- verfügt über ein breites mikrobizides Wirkungsspektrum
- wirksam gegen gramnegative und grampositive Bakterien, Hefen, Pilze und Viren einschl. HBV- und HIV-Viren

ANWENDUNGSBEREICH:

Zur Desinfektion aller Flächen, Einrichtungen und Gegenständen im Krankenhaus und in der allgemeinen Praxis, Schwimmbädern, Solarien, Saunen.

DOSIERUNG UND KONTAKTZEITEN:

Bakterizide/ Levurozide	Organische Belastung	Konzentration [%]	Einwirkzeit [min]	Dosierung [ml/l Wasser]		
				1l	8l	10l
VAH	gering	7,5	5	75	600	750
		2,0	15	20	160	200
		1,0	60	10	80	100

Viren (RKI/ DVV Richtlinien)	Organische Belastung	Konzentration [%]	Einwirkzeit [min]
Hepatitis-B Virus	gering	1,5	30
		5,0	1
	hoch	3,0	30
		1,5	60
Rota Virus	gering	0,25	1
Vaccinia Virus	gering	1,0	15
	hoch	3,0	15
BVDV	hoch	7,5	1
		0,5	15
		7,5	1

Viren (EN 14476)	Organische Belastung	Konzentration [%]	Einwirkzeit [min]
Norovirus EN 14476	gering	6,0	30
Influenza A (H1N1) Virus EN 14476	hoch	3,0	15

KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-195
info@kleen-purgatis.de
www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der BUDICH GRUPPE

Vertrieb International:

KLEEN PURGATIS International AG

Firststrasse 30A
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 515 35 60
Fax +41 (0) 44 515 35 69
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.com

Wirksamkeit	Organische Belastung	Konzentration [%]	Einwirkzeit [min]
Rohes Holz kontaminiert mit Pilzen		2,0	60
		1,5	240
Acrylglas u.ä. Flächen		7,5	1
		5,0	5
Bakterizid EN 1040 P. aeruginosa, S. aureus		0,05	5
Bakterizid EN 1276 P. aeruginosa, S. aureus, E. coli, E. hirae	gering	1,0	5
Bakterizid EN 1276 Salmonella cholerasuis, Listeria monocytogenes	hoch	0,5	5
Fungizid EN 1650 C. albicans	gering	0,2	5
Fungizid 13624 C. albicans	gering	0,2	5
Bakterizid EN 13727 P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae	gering	1,0	5
Bakterizid EN 14561 P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae	gering	2,0	15
Fungizid EN 14562 C. albicans	gering	1,5	15
Bakterizid EN 13697 P. aeruginosa, S. aureus, E. coli, E. hirae		2,0	5
Levurozidie EN 13697 C. albicans		1,5	15

Anwendungshinweise: Nur in den vorgeschriebenen Konzentrationen und Zeiten anwenden. Flächen die mit Haut oder Lebensmitteln in Kontakt treten mit Wasser nachspülen. Sicherheitshinweise unbedingt beachten. Budesin U sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation beachten. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.


TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: farblose Flüssigkeit
Geruch: produktspezifisch
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 985 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 8

INHALTSSTOFFE:

5-15 %: kationische Tenside
Weitere Angaben: in 100 g Budesin U sind 3,35 % Didecyldimethylammoniumchlorid, 3,35 % Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid und 3,35 % Alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid als Desinfektionswirkstoffe enthalten
Giscode: GD 40
Zulassungs-Nummer: N-11974 · zugelassen als Desinfektionsmittel für den Privatbereich
Haltbarkeit: im Originalgebilde mind. 3 Jahre, vor Hitze schützen

KENNZEICHNUNG:

 <p>Gefahr</p>	<p>Enthält: Didecyldimethylammoniumchlorid, Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid, Alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid</p> <p>Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.</p> <p>Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.</p>
--	---

TRANSPORT:

UN-Nummer: 1903 / Bezeichnung: Desinfektionsmittel, flüssig, ätzend, n.a.g. / Klasse: 8 / Verpackungsgruppe: III / ADR

KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-195
info@kleen-purgatis.de
www.kleen-purgatis.de

**Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE**

Vertrieb International:

KLEEN PURGATIS International AG

Firststrasse 30A
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 515 35 60
Fax +41 (0) 44 515 35 69
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.com